

## MammoRead Report マニュアル抜粋版 ー計画停電時の対応についてー

計画停電が実施される場合、停電前後に下記の手順にてシステムの終了／復旧作業を実施してください。

### 【注意】

下記手順は、下記端末の組み合わせにおける MammoRead Report に関する場合を例にして手順を記載しています。

型番等、ご確認のうえ、実施してください。

- PC 型番:HP ProLiant ML310e Gen8 v2  
OS :Windows Server 2008 R2
- 無停電電源装置(UPS) 型番:HP T750G4

### 1. 停電前のシステム終了方法

- (1) MammoRead Report サーバに接続されている MammoRead クライアント端末を、すべてシャットダウンします。

#### 【注意】

MammoRead クライアントが起動したままサーバを終了すると、予期せぬ不具合を起こすことがあります。


必ずクライアント端末を終了してから、下記の手順を実行してください。

- (2) MammoRead Report サーバ端末上で、Windows2008 にログインします。

※CTL+ALT+DEL キーを押すよう促す画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。

ユーザ名 : administrator  
パスワード : (※システム管理者へご確認ください)

- (3) Windows のスタートメニューから[スタート]→[シャットダウン]を選択し、必要事項を入力し、[OK]をクリックします。

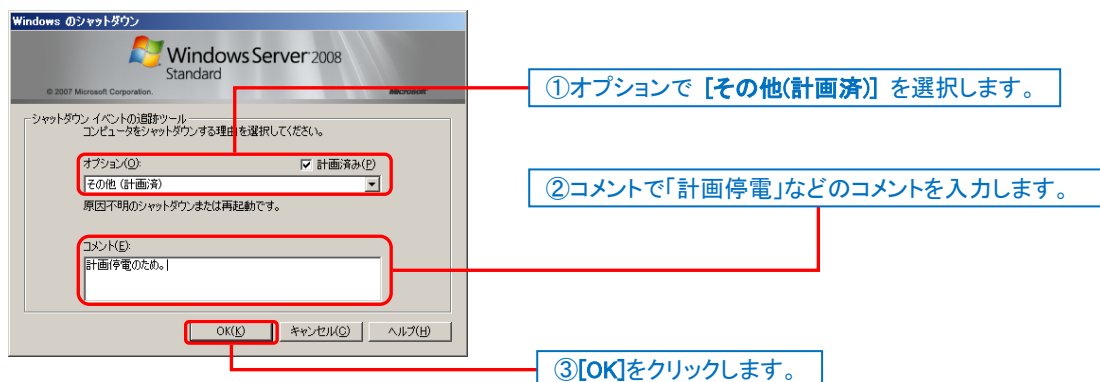

- (4) レポートサーバの電源が切れていることを確認します。



- (5) 無停電電源装置(UPS)の電源を切ります。



電源ボタンを2秒程度長押し、  
UPSの電源を切ります。  
(警告音が鳴るまで押してください)

- (6) 無停電電源装置(UPS)の電源ケーブルをコンセントから抜きます。

## 2. 停電後のシステム復旧方法

### 【注意】

**MammoRead Report** サーバ端末を起動する前に **MammoRead** クライアント端末を起動すると、クライアント端末からサーバへ接続できず、不具合を起こすことがあります。必ず、サーバ端末を起動してから、クライアント端末を起動してください。

- (1) 無停電電源装置(UPS)の電源ケーブルをコンセントに差します。
- (2) 無停電電源装置(UPS)の電源を入れます。



※ 端末により、手順(2)の無停電電源装置(UPS)の電源を入れると、PCも同時に起動する場合があります。その場合は、手順(4)へ進んでください。

- (3) レポートサーバ端末 PC を起動します。



- (4) Windows Server にログインします。

ユーザ名               : administrator  
パスワード           : (※システム管理者へご確認ください)

- (5) MammoRead クライアント端末 PC を起動します。

※ サーバ端末起動後は MammoRead シリーズ関連のアプリケーションの起動に時間がかかる場合があります。サーバ端末起動後は、少し時間をおいてから、クライアント端末を起動してください。